

選別精液 (Sort⁹⁰) のストローについて


(社)家畜改良事業団

!! Sort⁹⁰ ストローが新しくなりました!!

Sort⁹⁰のストロー構成を、下図のとおりエア- (空気)層を挟む2層構造に変更いたします。シール側の層に精液が入っています。

なお、変更は平成22年6月7日生産分(22.06.07)からとなります。

<新ストロー>

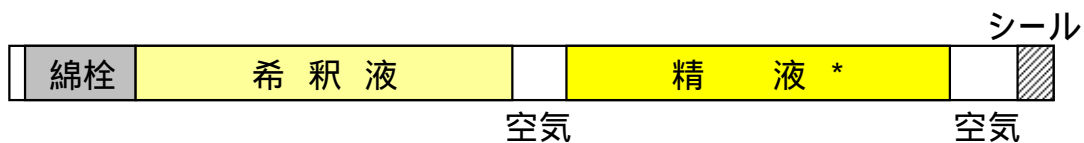

現在流通している Sort⁹⁰には、以前の3層構造のものもありますのでご注意ください。以前のストロー構成は、下図のとおりエア- (空気)層を挟む3層構造で、中央の層に精液が入っています。

<旧ストロー>



* 精子を含む希釈液

Sort⁹⁰を用いて高い受胎率が得られるようにするために、次のことにご留意下さい。

1. 精液注入器は、滅菌済みのシース管装着型を使用して下さい。
2. 凍結精液の融解には、**38度の温湯**を用いて下さい。ストローを温湯中に浸漬し、気泡が上がり、氷が完全に溶けたら取り出して下さい。
目安は、15秒間です
3. **ストローを振らずに**シール側の空気層でカットし、注入器に入れ授精して下さい。(シール側空気層に精液がある場合はストローを軽く振ってもかまいませんが、振りすぎると精子が綿栓に付着し少なくなります。)
4. 子宮内に細菌等を持ち込まないように、ストローおよび精液注入器は衛生的に取り扱って下さい。
子宮内への細菌の持ち込みを防ぐため、(受精卵移植時と同様に)注入器にはビニールカバーを被せて膈内に挿入することをお奨めします。