

耳片の採取方法

※ ワンタッチサンプラー リキッド使用の場合



- ①ワンタッチサンプラー用アプリケーター
②提出用・保管用ラベル③チューブ返送用袋④ワンタッチサンプラーリキッド⑤刃を準備して下さい。

※使用方法については、[サージミヤワキ株式会社 HP](#) と[当団HP](#)を参照して下さい。



- 2 提出用ラベルに採取する牛の個体識別番号を明記して下さい。



- 3 耳片を採取する耳の両面をペーパータオル等で拭き取って下さい。この時に、個体識別番号の確認を行って下さい。

※飼料等の異物が混入すると正確な検査結果が得られません。



- 4 アプリケーターに刃とワンタッチサンプラーをセットして下さい。土台の穴の中にワンタッチサンプラーが入っていることを確認します。

※刃の使いまわしできません。1頭に1容器です。



- 5 耳標を取り付ける要領でパンチを行います。刃は、耳の後ろから当てて下さい。血管部にパンチを行わないように注意して下さい。

※出血した場合は、圧迫して止血を行って下さい。



- 6 アプリケーターから容器を取り出し、チューブ返送用袋に入れて下さい。耳片が入っていない場合は、採取されていませんのでもう一度行って下さい。

刃は容器のフタになりますのでそのまま送って下さい。



- 7 採取した日と耳標番号、農場名(氏名)を記入して送付して下さい(保管・送付とも常温で構いません)。